



# SPITZEN THD FUSION FLEX 6"

## THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM ARTIKELNR. 8002216



Die Spitze Smoke-Evac Fusion Flexible 6" 3mm Ball wird verwendet, um Blutgefäße während eines chirurgischen Eingriffs durch elektrothermische Koagulation zu verschließen. Diese Spitze wird auch zur Behandlung der Analdysplasie bei der hochauflösenden Anoskopie (HRA) verwendet. Diese flexible Spitze ermöglicht es dem Anwender, während der Behandlung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Winkeln zu erreichen. Der schädliche Rauch wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze wird mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) verwendet. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das THD Light-Scope Procto HRA (800191) und biegen Sie die Spitze ca. 2 cm vom Handstück in den gewünschten Winkel. Aktivieren Sie während der Behandlung immer den Smoke-Evacuator, um maximale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

## THD 14-1066 FLEX 6" BLADE ARTIKELNR. 800219



Die Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Blade ist eine teflonbeschichtete Spitze, mit einer Edelstahlklinge, die zur Ablation von Läsionen während der hochauflösenden Anoskopie (HRA) und bei Behandlungen mit elektrothermischer Verbrennung verwendet wird. Die flexible Spitze ermöglicht es dem Anwender, während der Behandlung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Winkeln zu erreichen. Der bei chirurgischen Eingriffen entstehende Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das THD Light-Scope Procto HRA (800191) und biegen Sie die Spitze ca. 2 cm vom Handstück in den gewünschten Winkel. Aktivieren Sie während der Behandlung immer den Smoke-Evacuator, um maximale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

## THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM



## ARTIKELNR. 800217



Die Spitze Smoke-Evac Fusion Flexible 6'' 5mm Ball wird verwendet, um größere Blutgefäße während eines chirurgischen Eingriffs durch elektrothermische Koagulation zu verschließen. Diese flexible Spitze kann bei der hochauflösenden Anoskopie (HRA) zur Behandlung größerer Fälle von Analdysplasie verwendet werden. Die flexible Spitze ermöglicht es den Anwendern, während der Behandlung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Winkeln zu erreichen. Der bei chirurgischen Eingriffen entstehende Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das THD Light-Scope Procto HRA (800191) und biegen Sie die Spitze ca. 2 cm vom Handstück in den gewünschten Winkel. Aktivieren Sie während der Behandlung immer den Smoke-Evacuator, um maximale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

## THD 14-1045T FUSION FLEX 6'' SUCT COAG TIP

### ARTIKELNR 800220



Die Smoke-Evac Fusion 6'' Flexible Suction Coag Tip ist eine teflonbeschichtete Spitze zum Absaugen von Rauch und Flüssigkeiten, während die Blutgefäße geschlossen werden und eine schnellere Hämostase ermöglichen. Diese flexible Spitze ermöglicht es den Anwendern, während der Behandlung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Winkeln zu erreichen. Der bei chirurgischen Eingriffen entstehende Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn ein elektrochirurgischer Generator verwendet wird, ist diese Spitze mit dem Handstück Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) und dem Tissue Catch Tubing Kit (800208) zu verwenden. Wir empfehlen die Verwendung mit dem THD Light-Scope Procto HRA (800191).

**THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP****ARTIKELNR. 800218**

Die Nadelspitze Smoke-Evac Fusion Flexible 6" Needle Tip wird zur Entfernung von Kondylen bei hochauflösenden Anoskopieverfahren (HRA) verwendet. Die dünne Spitze ermöglicht das Schneiden von Geweben auch während der Verwendung mit dem HF-Exsikkator (800231). Diese flexible Spitze ermöglicht es den Anwendern, während der Behandlung eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Winkeln zu erreichen. Der bei chirurgischen Eingriffen entstehenden Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Handstück Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das THD Light-Scope Procto HRA (800191) und biegen Sie die Spitze ca. 2 cm vom Handstück in den gewünschten Winkel. Aktivieren Sie während der Behandlung immer den Smoke-Evacuator, um maximale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

SPITZEN THD FUSION FLEX 6"		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800216	1	THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM
800219	1	THD 14-1066 FLEX 6" BLADE
800217	1	THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM
800220	1	THD 14-1045T FUSION FLEX 6" SUCT COAG TIP
800218	1	THD 14-1056 FUSION FLEX 6" NEEDLE TIP

ANGESCHLOSSENE GERÄTE		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800231	1	THD DERM A942 HIGH FREQ.
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT - Elektrochirurgiegerät)



## SPITZEN THD FUSION 2"

### THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM

#### ARTIKELNR 800224



Die Spitze Smoke-Evac Fusion 2" 5mm Ball Tip wird verwendet, um größere Blutgefäße bei einer Dammbehandlung durch elektrothermische Koagulation zu verschließen. Diese Spitze kann bei der hochauflösenden Anoskopie (HRA) zur Behandlung größerer Fälle von perianaler Dysplasie verwendet werden. Der bei chirurgischen Eingriffen entstehende Rauch, der potentiell gefährliche Substanzen enthält, wird von der Elektrodenspitze angesaugt. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden.

### THD 14-1002PA FUSION 2" PLASTIC BLADE

#### ARTIKELNR. 800222



Die Smoke-Evac Fusion 2" Plastic Blade ist eine teflonbeschichtete Spitze, mit einer Edelstahlklinge, die zur Ablation von perianalen Läsionen während der hochauflösenden Anoskopie (HRA) und bei Behandlungen mit elektrothermischer Verbrennung verwendet wird. Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden.



## THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP ARTIKELNR. 800223

Die Spitze Smoke-Evac Fusion 2'' Needle Tip wird bei hochauflösenden Anoskopieverfahren (HRA) zur Entfernung von externen Kondylen verwendet. Die dünne Spitze ermöglicht das Schneiden der Gewebe auch bei Verwendung des HF-Exsikkators (800231). Wenn sich verbrannte Gewebereste ansammeln, reinigen Sie diese mit einer angefeuchteten Gaze. Diese Spitze ist mit dem Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) oder einem speziellen Tubing-Set (800212) zu verwenden.

SPITZEN THD FUSION 2''		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800224	1	THD 14-1022 FUSION 2'' BALL 5MM
800222	1	THD 14-1002PA FUSION 2'' PLASTIC BLADE
800223	1	THD 14-1012 FUSION 2'' NEEDLE TIP

ANGESCHLOSSENE GERÄTE		
Artikelnr.	Anz.	Bezeichnung
800181	1	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
800231	1	THD DERM A942 HIGH FREQ.
800182	1	THD A1250 ESU (ELECTRIC SURGICAL UNIT - Elektrochirurgiegerät)